

## Instellen van de Tanita MC-580 in PC-modus

### Inleiding

In deze handleiding leggen we je stap voor stap uit hoe je de Tanita MC-580 weegschaal in de PC-modus kan zetten zodat deze met Evry kan worden aangesloten

### Aansluiten van de weegschaal

Om de weegschaal te kunnen aansluiten op je computer heb je een speciale kabel nodig. Dit is een zogenaamde USB A naar RS232 Seriéle Kabel. Deze kabel is te koop bij de computer speciaalzaak.

Sluit de kabel aan op de weegschaal en op de computer.



### Instellen van de weegschaal in PC-modus

1. Zet de weegschaal aan

2. Wacht tot er op het display van het handvat van de weegschaal de onderstaande tekst verschijnt.

"MC-580" "VERX. X" "PREPARING" "888.8kg" "WEIGHT" "0.0kg"

3. Houd de **[V]** toets +/- 5 seconden ingedrukt op het handvat tot de melding "SETTINGS 1" "PAIRING" verschijnt.


4. Druk op de **[V]** toets. De melding "SETTINGS 11" "CONTROLE MODE" verschijnt.

Druk hierna op de **[SET]** toets.

5. Zodra de melding "CONTROLE MODE" "BLE" "PC" verschijnt, druk je op de

**[V]** toets.

6. Op het display knippert nu de keuze "PC". Druk op de **[SET]** toets om te bevestigen.

7. Druk op de  **[ ]** toets om terug te gaan naar "WEIGHT" "0.0KG".

Op het scherm staat nu "P" om aan te geven dat de pc-modus is geactiveerd.

